


Anleitung für die Dienststellen zur Zusammenstellung des Selbsttest-Kits der Fa. Roche

In diesem Dokument wird die Zusammenstellung der Einzel-Testkits zur Ausgabe an die Beschäftigten beschrieben.

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie die Testkits aufteilen.

1

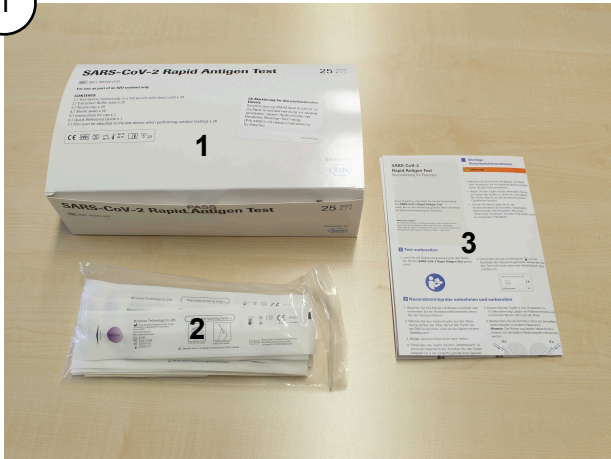

In der Lieferung erhalten Sie:


- (1) Kartons mit Komponenten für je 25 Testkits
- (2) Sterile Abstrichtupfer der Marke Miraclean zur Eigenanwendung
- (3) Deutsche Kurzanleitung, auch [hier](#) im Internet verfügbar

2



Die in den Testkit-Kartons enthaltenen sterilen Abstrichtupfer sind zu entsorgen und durch die Abstrichtupfer der Marke Miraclean (hier mit der Vorder- und Rückseite abgebildet) zu ersetzen. Diese unterscheiden sich nicht in der Länge. Der entscheidende Unterschied ist die höhere Steifigkeit der neuen Abstrichtupfer.

3

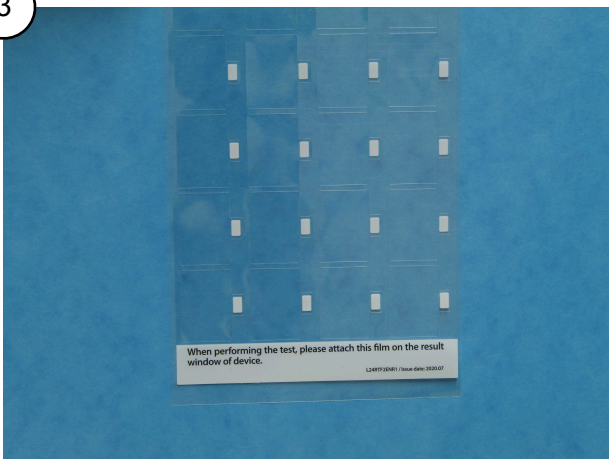

In den Kartons sind Schutzfolien für den Einsatz im Freien enthalten. Sie werden für die Testung der Beschäftigten der FHH nicht benötigt und sind durch die Dienststelle zu entsorgen.

4



In dieser Form finden Sie die Komponenten in den 25er Testkit-Kartons vor:

- (1) Tüte mit Extraktionspuffer-Röhrchen (**Bild 5**)
- (2) Spenderkappen (**Bild 6**)
- (3) Teststreifen im Verpackungsbeutel (**Bild 7**)
(Diesen bitte nicht öffnen, sondern den Beschäftigten verschlossen aushändigen)

5



Röhrchen mit Extraktionspuffer

6



Spenderkappen

7



Teststreifen (1) (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel (2) mit Trockenmittel (3))

Das beiliegende Trockenmittel dient als Indikator, ob der Test verwendbar ist. Die Farbe des Trockenmittels muss gelb sein. Die Entsorgung des Trockenmittels kann mit dem benutzten Testkit erfolgen.

8



Für ein Einzel-Kit zur Selbstanwendung müssen folgende Komponenten zusammengestellt werden.

Jeweils:

- (1) Einen Verpackungsbeutel mit Teststreifen und Trockenmittel (Diesen bitte nicht öffnen, sondern den Beschäftigten verschlossen aushändigen)
- (2) Ein Röhrchen mit Extraktionspuffer
- (3) Eine Spenderkappe
- (4) Ein steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean)

9



Die in einer Tüte verpackten Einzelkomponenten können so den Beschäftigten ausgehändigt werden.

Ergänzend zum Testkit wird die Kurzanleitung für Patienten zur Verfügung gestellt (in Papierform oder über die Internetseite der Fa. Roche (Links hierzu finden sich im AMD-Merkblatt „Selbsttests“)).